



# Moocall

CAPTEUR DE VÊLAGE

## Guide Utilisateur



# Merci d'avoir choisi Moocall

Chez Moocall nous sommes très fiers de nos produits et nous espérons que vous serez aussi satisfait de votre capteur de vêlage que nous sommes.

Nous attendons avec impatience que vous assistiez aux nombreux vêlages réussis en toute sécurité!

Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à nous contacter! Envoyez-nous un email à [help@moocall.com](mailto:help@moocall.com), discutez avec nous en ligne sur le site [www.moocall.com](http://www.moocall.com) ou appelez-nous aux numéros ci-dessus.

Bien cordialement,

L'équipe de Moocall



06 44 64 11 69



1-800-657-4291



+353 1 969 6038

Email: [help@moocall.com](mailto:help@moocall.com)

Web: [www.moocall.com](http://www.moocall.com)

Facebook: [www.facebook.com/moocall](http://www.facebook.com/moocall)

Twitter: [www.twitter.com/moocallsensors](http://www.twitter.com/moocallsensors)

## Étape 1: Activer votre capteur de vèlage Moocall

Pour utiliser votre nouveau capteur de vèlage Moocall, vous devez d'abord l'activer en ligne.

Connectez-vous sur [www.moocall.com/register](http://www.moocall.com/register) pour finaliser l'activation.

Si vous n'avez pas accès à Internet, appelez-nous pour activer votre capteur.

 06 44 64 11 69


 1-800-657-4291



+353 1 969 6038

Si le capteur n'a pas été activé, il s'éteindra juste après avoir été allumé.

## Étape 2: Ajuster le revêtement en caoutchouc

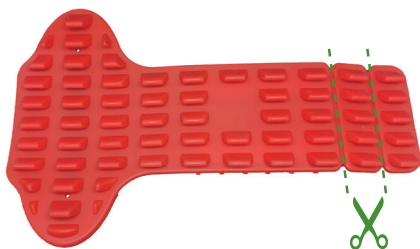

Le revêtement en caoutchouc peut être coupé selon la taille des queues des vaches dans votre troupeau. Pour des queues fines, coupez les deux segments; pour des queues de taille moyenne, coupez un segment, et pour des queues épaisses, ne coupez rien du caoutchouc.

Si les vaches de votre troupeau ont des queues avec différentes épaisseurs, contactez Moocall pour acheter des caoutchoucs supplémentaires.

## Étape 3: Charger le capteur

Pour charger votre capteur de vélage Moocall, retirez le revêtement en caoutchouc pour libérer le capot du chargeur, retirez le capot et insérez le câble de charge comme illustré.

Une fois le chargement terminé, remplacez avant le capot et après le revêtement en caoutchouc autour du capot du chargeur.




**IMPORTANT:** Assurez-vous que le capot du chargeur est sec avant de le replacer sur le capteur, pour être sûr d'une bonne étanchéité.





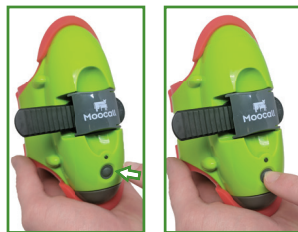

NE PAS forcer le câble USB dans le port de charge du capteur.

## Étape 4: Allumer le capteur

Pour l'allumer, appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant environ quatre secondes. La lumière sur le capteur clignotera plusieurs couleurs jusqu'à clignoter en bleu toutes les 4-5 secondes, indiquant que le capteur est allumé et actif.



Maintenez le bouton enfoncé pendant dix secondes pour éteindre le capteur.

Indicateur lumineux	
 Capteur allumé et prêt à l'emploi	 Batterie faible
 Batterie complètement chargée	 Vêlage en cours
 Test en cours	 Mise à jour du logiciel en cours
 Capteur en cours de connexion	

Le capteur vous enverra un message lorsque le niveau de la batterie descend en dessous de 15%.

## Étape 5: Tester le capteur

S'il vous plaît, veuillez effectuer ce test dans la zone où le capteur sera utilisé, pour vous assurer que la couverture de votre réseau est suffisante pour que le capteur fonctionne.

Si vous ne recevez pas de message dans les dix minutes suivant l'exécution de ce test, contactez le Service clientèle de Moocall.

Si le capteur ne se met jamais à clignoter en bleu et s'éteint après avoir clignoté plusieurs couleurs pendant quelques minutes, soit vous devez activer votre capteur, soit vous pouvez avoir un problème de couverture réseau mobile dans votre zone. S'il vous plaît, contactez le Service clientèle de Moocall.



Assurez-vous que le capteur est allumé et que la lumière bleue clignote



Appuyez fermement sur le bouton pendant une demi-seconde



Relâchez et appuyez rapidement à nouveau sur le bouton



Le capteur devrait commencer à clignoter en vert, indiquant que le test est en cours

Si le voyant vert ne commence pas à clignoter lors de la deuxième pression, assurez-vous d'appuyer fermement sur le bouton et réessayez. Vous recevrez un SMS sur tous les numéros connectés au capteur, un E-mail et un message de notification via l'application Moocall, si vous l'avez installée.

N'appuyez sur le bouton qu'avec votre doigt, n'utilisez aucun outil car cela pourrait endommager le bouton et l'électronique à l'intérieur.

## Étape 6: Ouvrir le fermoir

Soulevez le cliquet noir pour ouvrir le fermoir Moocall et poussez le cliquet tout au fond vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'enclenche, en vous permettant de desserrer la sangle.



## Étape 7: Placer le capteur sur la queue


Placez le capteur sur la queue d'une vache près du vêlage. Le capteur doit être placé sur la queue en face de la vulve.



Insérez la sangle crantée dans le cliquet.



Fermez le cliquet et appuyez sur le fermoir. Tirez l'extrémité libre de la sangle crantée jusqu'à ce que le capteur soit fixé sur la queue de la vache.

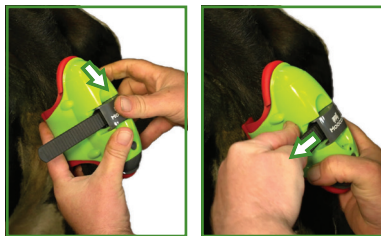

Assurez-vous que le capteur est bien fixé sur la queue en testant l'ajustement. Le capteur devrait pouvoir se déplacer d'un côté à l'autre, mais pas vers le bas sur la queue. Ajustez l'étanchéité de la sangle au besoin jusqu'à ce qu'un ajustement correct soit obtenu.



Démonstration vidéo disponible sur [www.moocalll.com/user-guide](http://www.moocalll.com/user-guide)

**IMPORTANT! NE PAS TROP SERRER! Si le capteur est trop serré sur la queue, vous recevrez de fausses alertes et vous risquez de causer des dommages permanents et irréversibles à la vache!**

**NOTE:** S'il vous plaît assurez-vous que votre revêtement en caoutchouc a été ajusté à la taille de la queue de votre vache. L'utilisation d'un caoutchouc de mauvaise taille peut gêner l'animal et générer de fausses alertes du capteur.


## Étape 8: Vérifier l'ajustement du capteur sur la queue

Une fois que le capteur de vêlage Moocall est placé sur la queue, assurez-vous que le revêtement en caoutchouc ne se détache pas de la sangle crantée, pour éviter que la sangle frotte sur la queue ou que le caoutchouc même se plie ou se chevauche avec le boîtier en plastique.




# Moocall SMS d'alerte


Voilà les SMS d'alerte que le capteur de vèlage  
Moocall enverra sur votre téléphone.

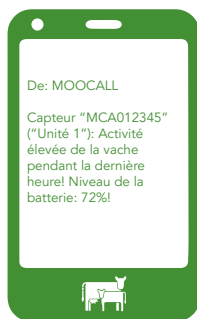


**Première alerte**

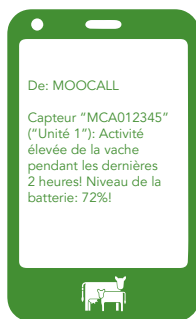

**Deuxième alerte**

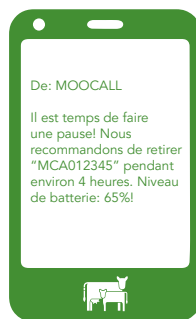


**Temps d'arrêt**

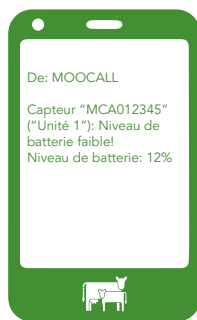

**Alerte batterie faible**



**SMS Test**

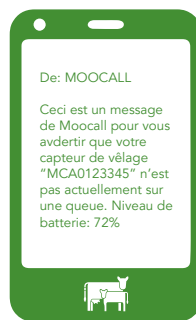


**Message hors-queue**



# Tableau de bord MyMoocall

Lorsque vous enregistrez votre capteur Moocall, vous choisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour le tableau de bord MyMoocall. Ici vous pouvez voir l'état de tous vos capteurs dans le panneau de gauche, et toutes les alertes envoyées dans le panneau central. Vous pouvez gérer les numéros dans le panneau de droit et vos alertes e-mail, le fuseau horaire et les paramètres de langue dans le menu déroulant de votre nom d'utilisateur, en haut à droite.

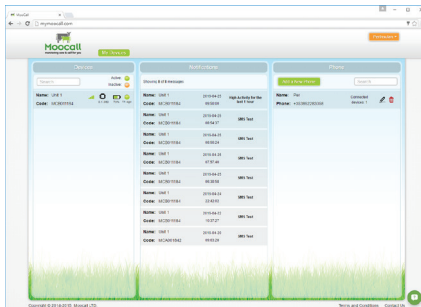

Accédez au tableau de bord MyMoocall via [www.mymoocall.com](http://www.mymoocall.com)



L'application Moocall Breedmanager est disponible pour les appareils Android et iOS. Cherchez "Moocall" dans votre App Store et installez-la. Connectez-vous à l'application avec le même nom d'utilisateur et mot de passe que vous utilisez pour accéder à votre tableau de bord MyMoocall.

L'application vous donne accès aux mêmes fonctions que vous avez dans le tableau de bord MyMoocall et bien plus encore: un outil de gestion de troupeau, des notifications qui font sonner votre téléphone en plus des textos, le forum Q&A et plus encore. Tout cela fonctionne avec le WiFi si le signal mobile qui vous entoure est faible ou absent, pour vous assurer de ne jamais manquer une alerte.

## Étape 9: Retirer le capteur

Retirez le capteur lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. Soulevez le cliquet noir pour ouvrir le fermoir Moocall et poussez le cliquet tout au fond vers la gauche jusqu'à ce qu'il s'enclenche et desserrez la sangle.



## Étape 10: Nettoyer le capteur

Nettoyez doucement avec une brosse sèche ou un chiffon humide. Nettoyer toujours le capteur après chaque vêlage.




**REMARQUE: NE PAS immerger le capteur dans l'eau ou d'autres liquides!**

**ATTENTION! NE PAS NETTOYER LE CAPTEUR SANS QUE LE CAPOT DE CHARGEUR SOIT EN PLACE**

## Étape 11: Réinitialiser le capteur

Après un vêlage, appuyez sur le bouton pendant une seconde pour réinitialiser. La lumière rouge fixe passe à bleue clignotante et le capteur est maintenant prêt à être placé sur la prochaine vache. Le capteur se réinitialisera automatiquement après une heure, s'il n'est pas réinitialisé manuellement. Pour éteindre le capteur, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant dix secondes.

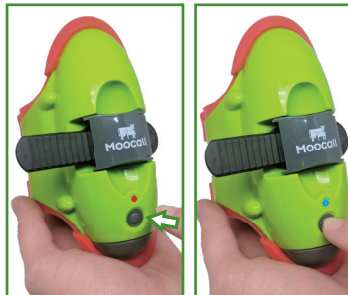

# Informations supplémentaires sur le capteur

## IMPORTANT!

Le capteur Moocall est conçu pour offrir une aide précieuse aux éleveurs pendant la saison des vêlages. Il n'est pas garanti de prédire chaque vêlage!

Des niveaux raisonnables de supervision directe ou par caméra doivent être maintenus pendant les périodes de vêlage.

Il est recommandé que les éleveurs utilisent leur propre expérience et connaissance du troupeau pour assurer la meilleure performance du capteur. Par exemple, si le capteur est placé sur une vache très mature, qui peut vêler en temps rapides, ou sur une vache qui ne présente pas les niveaux normaux de détresse ou de douleur avant le vêlage, le capteur pourrait ne pas envoyer le SMS d'alerte au téléphone portable de l'éleveur.

S'il vous plaît, serrez le capteur en ajustant le degré de resserrement de la sangle pour éviter que le capteur tombe de la queue; si le capteur est trop serré, il peut gêner l'animal et cela peut causer des fausses alertes.

Si la vache n'a pas vêlé dans les quatre jours suivant la pose du capteur sur la queue, veuillez retirer l'unité de la queue pendant 3-4 heures avant de la placer à nouveau, pour éviter tout risque de gêner l'animal.

Les capteurs Moocall sont capables de détecter un vêlage précoce, même si cela n'est pas forcément visible par l'éleveur. S'il vous plaît, veuillez surveiller régulièrement votre vache après la réception des messages d'alerte.

Le comportement des vaches diffère considérablement d'une vache à l'autre. Les capteurs Moocall prédisent un pourcentage très élevé de vêlages (environ 95%). Moocall Ltd ne prend pas la responsabilité pour les vêlages ratés parce que détectés avec un court préavis ou sans préavis par textos.

Le capteur de vêlage Moocall a été conçu uniquement pour les bovins. S'il vous plaît ne pas utiliser le capteur sur autres animaux.

Visitez [www.moocall.com/user-guide](http://www.moocall.com/user-guide) pour vidéos et informations

# Maintenance de la batterie

Afin de préserver la durée de vie de la batterie et la longévité du capteur, après la saison de vêlage, rechargez la batterie avant de ranger le capteur.

**REMARQUE: CHARGEZ LA BATTERIE ENTIÈREMENT AVANT DE RANGER LE CAPTEUR!**

## Composants du capteur

Chargeur



Adapteur AU/NZ



Adapteur US



Adapteur EU



Câble de charge



Capot du chargeur



Sangle



Écrou et vis



Cliquet réglable



Revêtement en caoutchouc



Fermeir



# Mes capteurs de v lage Moocall

 crivez ici vos num ros MC- et IMEI des capteurs Moocall:

MC-num ro:

IMEI-num ro:

---

---

---

---

## MyMoocall identifiant

 crivez vos MyMoocall identifiants ici:

Nom d'utilisateur:

---

Mot de passe:

---

[www.mymoocall.com](http://www.mymoocall.com)

Notes:

# Contactez Moocall

Notre Service à la clientèle est toujours à votre disposition pour répondre à vos questions concernant les produits Moocall.

Nous sommes joignables de différentes manières:

Par téléphone:



06 44 64 11 69



1-800-657-4291



+353 1 969 6038

Par e-mail:

[help@moocall.com](mailto:help@moocall.com)

Web:

[www.moocall.com](http://www.moocall.com)

Facebook:

[www.facebook.com/moocall](http://www.facebook.com/moocall)

Twitter:

[www.twitter.com/moocallsensors](http://www.twitter.com/moocallsensors)

Un service de messagerie instantanée est disponible sur [www.moocall.com](http://www.moocall.com), [www.mymoocall.com](http://www.mymoocall.com), sur notre page Facebook [www.facebook.com/moocall](http://www.facebook.com/moocall) et dans l'application Moocall Breedmanager.

Par poste:

Moocall Ltd.

Carraig House

Brookfield Terrace

Blackrock A94 A5R9

Co. Dublin

Irlande



Moocall est une marque déposée

#### Termes et conditions Moocall

Vous reconnaissez et acceptez que l'achat et / ou l'utilisation du capteur de vêlage Moocall ( "L'appareil") soit régi par les conditions standard et les conditions d'approvisionnement de Moocall qui peuvent être trouvées sur [<http://moocall.com/terms>] (CGV). L'achat et / ou l'utilisation de l'appareil par vous constitue une acceptation des conditions générales de vente et une reconnaissance que vous avez lu et compris ces CGV.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.  
FCC ID: R17GE865 / N7NHL8548

#### Dépannage:

Tél:

 06 44 64 11 69  
 1-800-657-4291

 +353 1 969 6038

Email: [help@moocall.com](mailto:help@moocall.com)

